



بسمه تعالی

تاریخ: ۹۸/۱۲/۱۹

شماره:

پیوست: ندارد

روش نمونه گیری:

- ۱- ابتدا بیمار باید نمونه اول صبح را دور بریزد.
- ۲- سپس طی دو ساعت مایعات زیاد مصرف کرده و بعد نسبت به جمع آوری نمونه اقدام نماید.
- ۳- باید توجه داشت جمع آوری نمونه در ظرف تمیز، بدون نیاز به الکل یا فرمالین انجام شود.
- ۴- نمونه باید بلافاصله به آزمایشگاه ارسال گردیده در غیر این صورت نمونه باید در یخچال نگهداری شود.

روش تهیه لام سیتولوژی:

- ۱- ابتدا از نمونه جمع آوری شده ۳ لوله ادراری جدا کرده.
- ۲- سپس هر ۳ لوله با دور ۲۰۰۰ به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ شده .
- ۳- مایع رویی اوت گردیده و ته نشست هر ۳ لوله را یکی کرده.
- ۴- به میزان حجم ته نشست بدست آمده باید الکل ۵۰٪ روی آن ریخته و تکان دهید.
- ۵- برای بار دوم لوله حاوی الکل و ته نشست را سانتریفیوژ کرده.
- ۶- مایع رویی دور ریخته و از ته نشست لام میگیریم.
- ۷- باید توجه داشت برای تهیه لام یه قطره در وسط لام گذاشته و انرا بصورت دورانی پخش میکنیم.

- نکته: ضخامت لام تهیه شده نباید زیاد باشد .

با تشکر

