



راهنمای پذیرش نمونه جهت بررسی CD مارکرها

آزمایشگاه ارجاع دهنده محترم

لطفاً در مورد ارسال تست CD مارکرها به نکات زیر توجه فرمایید:

- نمونه بیمار جهت انجام تست در دمای اتاق به آزمایشگاه منتقل شود.
- باید توجه داشت از زمان ارسال نمونه به آزمایشگاه و انجام تست بیشتر از ۲۴ ساعت نگذشته باشد، در غیر این صورت نمونه پذیرش نخواهد شد.
- نمونه ارسالی به هیچ وجه در یخچال نگهداری نگردد.
- نمونه به هیچ عنوان سانتریفیوژ نشود.
- نمونه همولیز و یا لیپمیک واضح قابل پذیرش نمیباشد و رد نمونه میگردد.
- ۵ سی سی نمونه خون کامل دارای EDTA و یا هپارین کافی میباشد.
- در مورد این تست، نیاز به اطلاعات CBC بیمار جهت گزارش پاسخ صحیح نیز میباشد. لطفاً در هنگام پذیرش نمونه اطلاعات CBC را نیز درخواست کرده و به آزمایشگاه ارسال فرمایید، در صورتی که بیماری تست CBC نداشت، این تست را نیز برای وی پذیرش نمایید.

با تشکر از همکاری شما

