

روش تهیه پلاسما سیتراته

پس از خونگیری (سرنگ یا سیستم venoject) درون لوله تری سدیم سیترات ۱,۰ مولار (اگر سرنگ استفاده می شود سرسوزن خارج شده و خون به آرامی از کناره داخلی اضافه شود) حدود ۳-۵ دقیقه به آرامی مخلوط شود و حداکثر تا ۱۰ دقیقه (شاید با توجه به نوع آزمایش بلافاصله سانتریفوژ انجام شود یا شاید نیاز به سانتریفوژ یخچال دار باشد) با دور ۳۰۰۰-۳۵۰۰ به مدت ۱۰-۱۵ دقیقه سانتریفوژ شود، بلافاصله پلاسما برای انجام آزمایش، نگهداری یا انتقال جداسازی شود.